


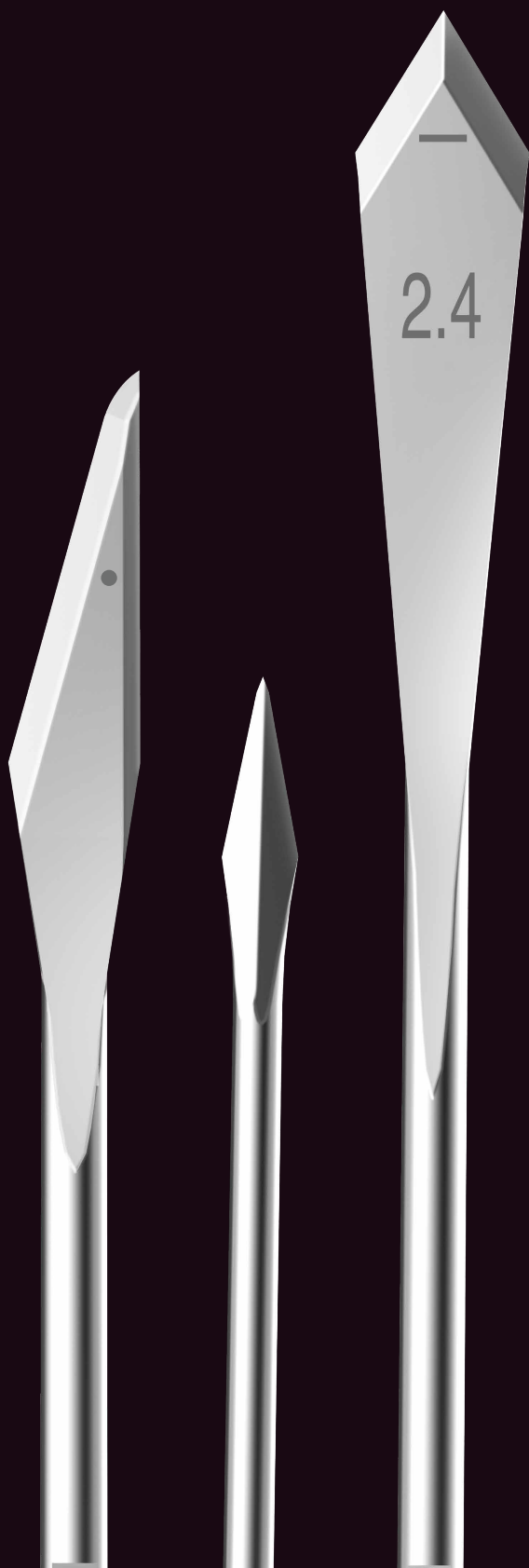

S H O S O

DISPOSABLE
MICROSURGERY KNIFE


理想の切れ味

ストレートナイフ STRAIGHT KNIVES

- ・鍛造加工技術により剛性を持たせ、穿刺性能が向上しています。
- ・ダブルケミカルエッチング(KAI独自技術)により、優れた切れ味を有しています。
- ・強膜半層切開やサイドポート作成に適しています。
- ・視野を妨げないスリムな形状です。
- ・サイドポート作成の目安となるドットを表示しています。



品番	角度
ST15	angle 15°
ST225	angle 22.5°
ST30	angle 30°

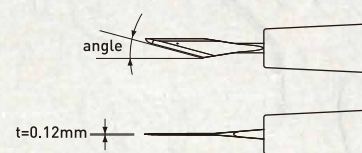

ドット表示

1mm幅の位置を点で表示しており、サイドポート作成の目安となります。

スリットナイフ SLIT KNIVES


ベベルアップ

- ・鍛造加工技術により剛性を持たせ、操作性を向上させています。
- ・ダブルケミカルエッチング(KAI独自技術)により、優れた切れ味を有しています。
- ・コンパクトなヘッドの為、眼瞼裂の狭い患者様や奥目の患者様に適しています。
- ・トンネル作成の目安となるラインとサイズを表示しています。
- ・低反射処理をしており、術中の反射を低減しています。
- ・強角膜三面切開に最適で、経結膜一面切開や角膜切開にも適しています。



品番	刃幅
SL18	w=1.8mm
SL20	w=2.0mm
SL22	w=2.2mm
SL23	w=2.3mm
SL24	w=2.4mm
SL25	w=2.5mm
SL265	w=2.65mm
SL275	w=2.75mm
SL28	w=2.8mm
SL30	w=3.0mm

Anti-glare type
Bevel up

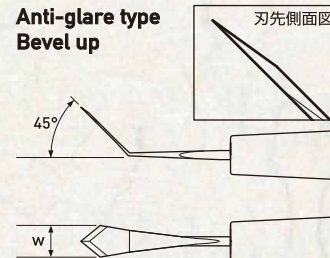


MVR ナイフ MVR KNIVES


- ・白内障手術のサイドポート作成に適しています。
- ・従来品より刃体部分を短くし、操作性を向上させています。



品番	刃幅	直径
VK20	w=1.25mm	Φ=0.9mm
VK20B	w=1.25mm	Φ=0.9mm

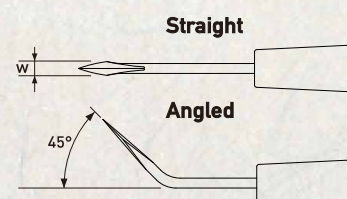


従来品

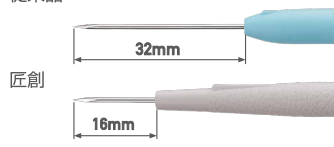


サイドポート作成に特化

刃体部分の長さを16mmと短くし、より手元に近いところでサイドポートが作成できます。


スリットナイフの特長

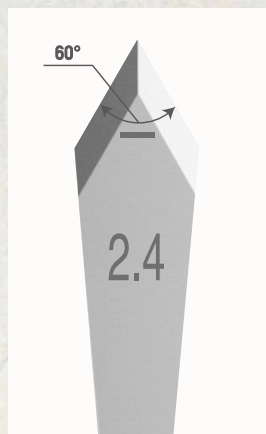


匠創スリットナイフは刃先の開き角度を鈍角にすることで、内方切開線が直線になり、自己閉鎖の良い創口を作成しやすくなっております。

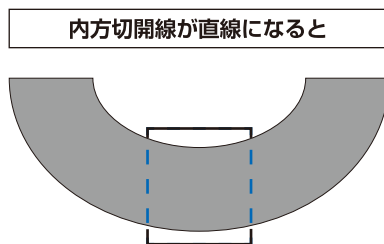

強膜トンネルの両脇が長い切開創となり、トンネル強度がある。自己閉鎖が良い。

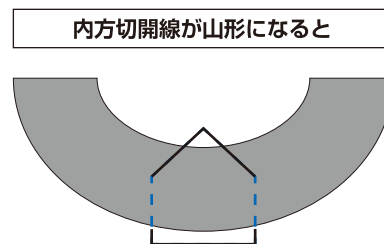


強膜トンネルの両脇が短い切開創となり、トンネル強度が弱い。自己閉鎖が甘くなる。

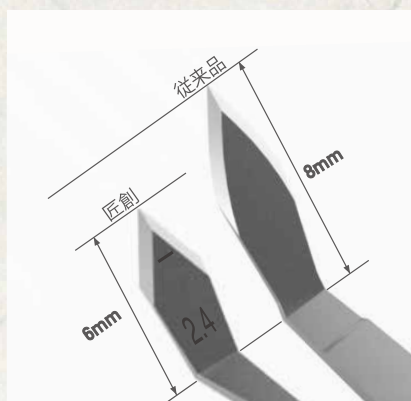

コンパクトヘッド

曲げ位置から先端までの長さを2mm短くすることにより、上方からアプローチする際の操作性を改善しました（特に眼瞼裂の狭い患者様と奥目の患者様に有用）。また、切開の作用点がハンドル軸に近くなるため、力の伝達が良くなり、思い通りの運行と切れ味向上を実現しました。

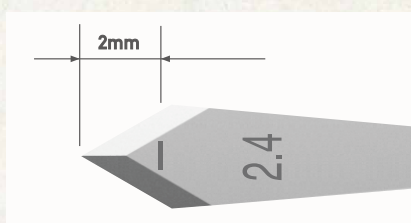


ラインとサイズ表示

先端から2mmの位置にラインを入れることでトンネル作成が容易になりました。また、最大幅のサイズ表示も入れています。



収納方法

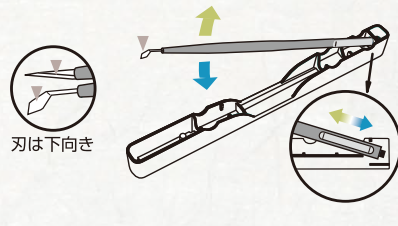

刃は下向き

- ディスポーザブル(単回使用)
- ポリプロピレンテレフタレート樹脂ハンドル
- ポリカーボネイト樹脂ケース
- EOG滅菌済み
- GS1-128/JANコード対応
- 5本/箱入



日本力。



S H O S O

私たちが生産の拠点を置く岐阜県関市は、刀剣の産地として800年の歴史があります。「折れず曲がらずよく切れる」という日本刀の神髄は、日本が誇る鍛造の技術によって、繊細かつ強靱な切れ味となって KAI 鍛造眼科メスにもしっかりと受け継がれています。

「匠創」は技術力と創造力を表す漢字を使った新ブランド名で、赤い落款をイメージしたロゴには KAI のクオリティと誇りが込められています。



日本の伝統色を使用したハンドル。



日本刀をイメージした黒いパッケージ。



販売名：マイクロサージェリーナイフ
医療機器認証番号：219ABBZX00200000

KAI は医療の安全と QOL を追究し続けます

仕様は変更することがあります



製造販売元

カイ インダストリーズ株式会社

医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
E-mail: info-ind@kai-group.com
<http://www.kai-group.com/global/>