



医家向け

MADE IN JAPAN



iD®

SAFETY KNIFE



仕様は変更することがあります ■



製造販売元
カイ インダストリーズ株式会社
医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
<https://www.kaimedical.jp/>




SAFETY KNIFE

KIM-060 2411/2411 PDF1

KAIは医療の安全とQOLを追究し続けます


ストレートナイフ

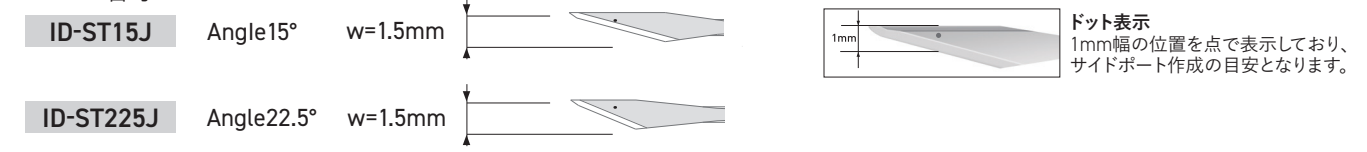


クレセントナイフ




スリットナイフ

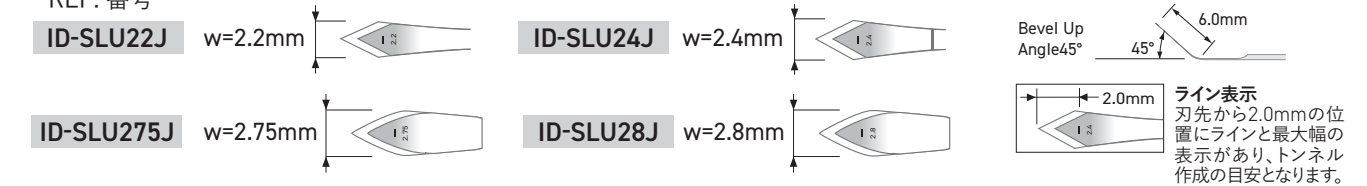

クリアコーニアルナイフ

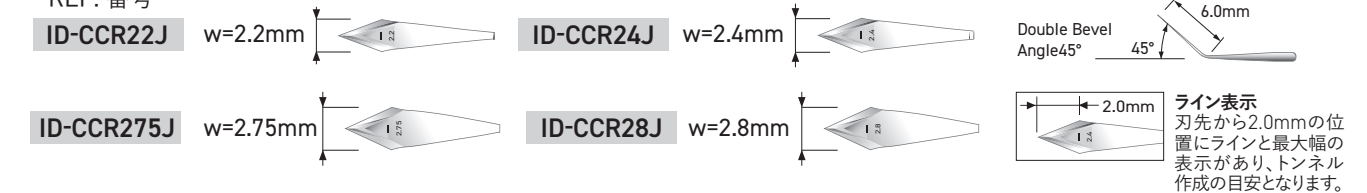


MVRナイフ

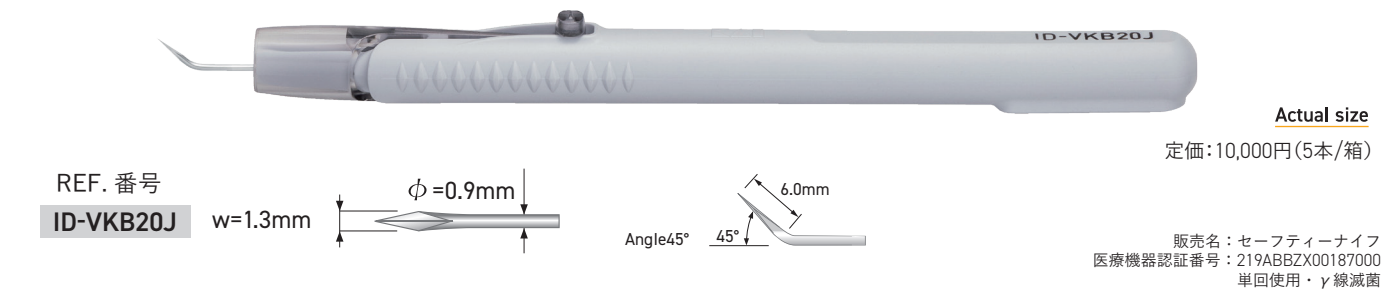

パッケージ



使用方法

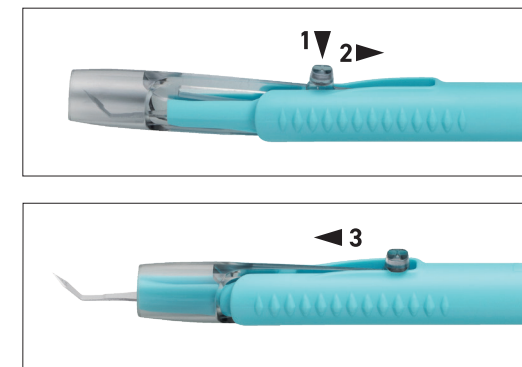

1. ブレードの突き出し方法
押しボタンを指で押し、押した状態でそのまま後ろに「カチッ」と作動音がするまで引き戻してください。その際、カバーが完全に固定されていることを確認してください。
2. ブレードの収納方法
押しボタンを指で前方向へ押し出してください。その際、カバーが完全にブレードを収納した状態で固定されていることを確認してください。

定価一覧表

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
ストレートナイフ 15°	ID-ST15J	000MK6201	4560146928287	5本	¥6,500
ストレートナイフ 22.5°	ID-ST225J	000MK6202	4560146928294	5本	¥6,500
クレセントナイフ 2.2mm	ID-CPU22J	000MK6322	4560146928317	5本	¥15,000
スリットナイフ 2.2mm	ID-SLU22J	000MK6422	4560146928331	5本	¥12,000
スリットナイフ 2.4mm	ID-SLU24J	000MK6424	4560146928348	5本	¥12,000
スリットナイフ 2.75mm	ID-SLU275J	000MK6427	4560146928362	5本	¥12,000
スリットナイフ 2.8mm	ID-SLU28J	000MK6428	4560146928379	5本	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.2mm	ID-CCR22J	000MK6522	4560146928393	5本	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.4mm	ID-CCR24J	000MK6524	4560146928409	5本	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.75mm	ID-CCR275J	000MK6527	4560146928423	5本	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.8mm	ID-CCR28J	000MK6528	4560146928430	5本	¥12,000
MVRナイフ 20G Bent	ID-VKB20J	000MK6620	4560146928454	5本	¥10,000