

機械器具38 医療用鉤

管理医療機器 単回使用眼球固定鉤 13381002

KAI トーリックゲージ/KAI トーリックマーカ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

＜併用医療機器＞

専用眼球固定鉤以外の眼球固定鉤と併用しないこと。

[「相互作用」の項参照]

＜使用方法＞

再使用禁止

再滅菌禁止

包装の破損等により製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

本品を曲げる、切削・打刻するなどの二次的加工をすることは折損の原因となるので絶対に行わないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 包装が破損している場合は使用しないこと。[滅菌有効期限内であっても、製品の滅菌状態を保証できない。]
- (2) 製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- (3) 使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切に処理すること。

2. 相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定以外の眼球固定鉤	不具合による危険性が高まる恐れがある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

【形状・構造及び原理等】

本品は、プラスチック製の眼球固定鉤である。

1. 外観

トーリックゲージ



トーリックマーカ



2. 材質

ABS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、眼科手術に用いられる固定鉤である。

【使用方法等】

トーリックゲージの鉤部分で眼球を押さえ、トーリックマーカの鉤部分をトーリックゲージの鉤部分の開放部へ嵌め込み、眼球を固定することで位置決めを行う。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。
- (2) 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4) 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じたりしないように保管すること。

2. 有効期限

使用期限が個装及び外装に記載されているので必ず確認すること。

[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カイ インダストリーズ株式会社

住 所：〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110

電 話 番 号：0575-28-6600